

INNOVATION 2014

Endermolift™ Rénovateur Anti-âge

Mission Peau Neuve

LPG® lance le 1^{er} Protocole
Peeling superficiel
professionnel développé par
les Médecins esthétiques
& les experts LPG®

La nouvelle technologie ENDERMOLIFT exclusive
optimisée avec les Kits LPG Peeling Technology
pour un résultat unique.



La 1^{ère} Solution LPG® PEELING TECHNOLOGY « DERMATO LIKE »

Exclusivement réservée à une utilisation professionnelle

DESCRIPTIF DU SOIN :

DURÉE : 35 MIN

Activateur de jeunesse, ce programme de soin relance la régénération cellulaire sur le visage et le cou pour un véritable effet peau neuve. Une combinaison exclusive de traitement ENDERMOLIFT et d'exfoliation chimique superficielle recommandée en cure 2 fois par mois à 15 jours d'intervalle pour optimiser le renouvellement cellulaire et l'éclat de la peau au fil des saisons.

Soins Techniques LPG® Professional



Étape 1 : Nettoyer et préparer la peau



LOTION MICELLAIRE PRÉ-TRAITEMENT

› APPLICATION

Appliquer sur l'ensemble du visage et du cou à l'aide de cotons imprégnés. Bien sécher la peau à l'aide de mouchoirs en papier doux.

Étape 2 : Activer les cellules de la jeunesse avec le soin Endermolift™ Rénovateur Anti-âge - 10 min

Ce Soin ENDERMOLIFT permet de préparer la peau à recevoir le peeling superficiel. Il réduit les risques de réactions cutanées et optimise l'efficacité du LPG Peeling Technology sélectionné.



ÉTAPE 1

DURÉE : 3min 30

- › OUTIL : LIFT 20
- › FRÉQUENCE HZ : 12
- › RC : 20
- › VITESSE BATTEMENT : 2
- › PROFONDEUR D'ACTION : 1-6
- › DÉPLACEMENT : GLISSÉ
- › MANOEUVRES : ø



ÉTAPE 2

DURÉE : 30sec

- › OUTIL : LIFT 20
- › FRÉQUENCE HZ : 12
- › RC : 30
- › VITESSE BATTEMENT : 2
- › PROFONDEUR D'ACTION : 2-4
- › DÉPLACEMENT : GLISSÉ
- › MANOEUVRES : ø



ÉTAPE 3


DURÉE : 3min 30

- › OUTIL : LIFT 20
- › FRÉQUENCE HZ : 12
- › RC : 20
- › VITESSE BATTEMENT : 2
- › PROFONDEUR D'ACTION : 1-6
- › DÉPLACEMENT : GLISSÉ
- › MANOEUVRES : ø



ÉTAPE 4 DURÉE : 30sec

- › OUTIL : LIFT 20
- › FRÉQUENCE HZ : 12
- › RC : 30
- › VITESSE BATTEMENT : 2
- › PROFONDEUR D'ACTION : 2-4
- › DÉPLACEMENT : GLISSÉ
- › MANOEUVRES : ◊

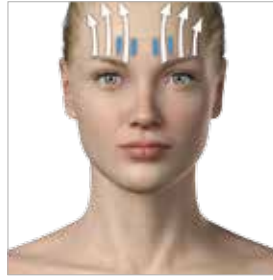

ÉTAPE 5 DURÉE : 2min

- › OUTIL : LIFT 20
- › FRÉQUENCE HZ : 12
- › RC : 30
- › VITESSE BATTEMENT : 2
- › PROFONDEUR D'ACTION : 2-4
- › DÉPLACEMENT : GLISSÉ
- › MANOEUVRES : ◊

Étape 3 : Exfolier & Régénérer la peau



› APPLICATION

PHASE 1

LOTION MICELLAIRE PRÉ-TRAITEMENT


Protéger les yeux avec des cotons imbibés de Lotion Micellaire Pré-traitement.

PHASE 2

LPG® PEELING TECHNOLOGY RÉNOVATEUR ANTI-ÂGE

Faire le diagnostic de peau et bien choisir le type de peeling superficiel adapté : KIT 10% pour les peaux sensibles ou KIT 20% pour les peaux normales à épaisses. Appliquer le soin LPG Peeling Technology sur le visage et le cou en couche épaisse et homogène. Faire glisser l'applicateur de l'intérieur vers l'extérieur du visage en descendant du front vers les tempes et les joues jusqu'au cou. Éviter le contact avec les yeux. Laisser poser 2-3 minutes sur les zones délicates et jusqu'à 5 minutes sur les autres zones.

Attention : L'application du LPG Peeling Technology peut entraîner une sensation de picotement car le sérum est très concentré. En cas de picotements insupportables, ôter immédiatement le sérum et rincer abondamment avec de l'eau.

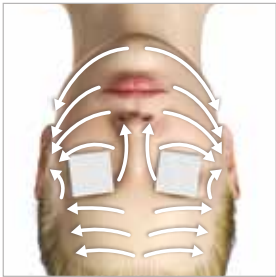

PHASE 3

LOTION MICELLAIRE PRÉ-TRAITEMENT

› APPLICATION

Retirer le peeling superficiel et nettoyer avec la Lotion Micellaire Pré-traitement LPG, jusqu'à complète disparition du produit à l'aide de cotons imbibés.

Étape 4 : Apaiser & Lisser la peau



PHASE 1

MASQUE COLLAGÈNE POST-TRAITEMENT

› APPLICATION

Appliquer sur l'intégralité du visage et laisser poser 15 minutes. Retirer et faire pénétrer l'excédent de sérum.

Option Soin premium : pendant la pose du Masque Collagène Post-traitement, réaliser le SOIN ZONE ENDERMOLIFT MAINS - 15min.



PHASE 2

SÉRUM LISSANT HYDRATATION INTENSE OU LE SOIN REPULPANT REDENSIFIANT

› APPLICATION

Appliquer sur l'ensemble du visage et du cou par effleurages ascendants du cou vers le front. *Attention : après ce soin il est recommandé d'éviter l'exposition au soleil et d'appliquer une protection solaire élevée.*

KITS PEELING ENDERMOLIFT RENOVATEUR ANTI-ÂGE

Associent l'action de l'acide glycolique et de l'acide mandélique pour accélérer et compléter le traitement ENDERMOLIFT pour des résultats anti-âge optimums.

- Favorise la régénération cellulaire pour un effet peau neuve.
- Lisse les rides et les ridules.
- Aide à lutter contre les taches, les irrégularités de la peau et les imperfections cutanées.
- Utilisation simplifiée, hygiénique, et distribution stérile avec la seringue airless et son système rechargeable (4 recharges) avec embouts interchangeables



KIT LPG® Peeling Technology Rénovateur Anti-âge 10%

- Spécialement recommandé pour les **PEAUX SENSIBLES (FINES ET RÉACTIVES)**
- 5% ACIDE GLYCOLIQUE
- 5% ACIDE MANDÉLIQUE



KIT LPG® Peeling Technology Rénovateur Anti-âge 20%

- Spécialement recommandé pour les **PEAUX NORMALES À ÉPAISSSES**
- 10% ACIDE GLYCOLIQUE
- 10% ACIDE MANDÉLIQUE



LPG SYSTEMS S.A.

Technoparc de la Plaine • CS 90035 - 30, rue du Dr Abel
26902 Valence Cedex 09 - France

Tél. : +33 (0)4 75 78 69 00 • Fax : +33 (0)4 75 42 80 85

www.lpgsystems.fr